

FICHE TECHNIQUE TROD

LE TROD est effectué par l'infirmière (ou par délégation le pair formé) :

Préparation						
	Se laver les mains et inviter le participant à se laver les mains, si possible à l'eau chaude pour faciliter le prélèvement	Identifier les TROD à effectuer, vérifie la date de péremption et l'intégrité des emballages	Ouvrir les emballages et déposer sur un plateau les 3 TROD de façon bien identifiée, afin de réaliser les 3 tests dans cet ordre :			
		TROD VHB 15 minutes d'attente avant la lecture du résultat	TROD VHC 15 minutes d'attente avant la lecture du résultat	TROD VIH à effectuer en dernier, la lecture du test se fait immédiatement		
Prélèvement						
	Avec des gants, désinfecter le doigt (en évitant la pince)	Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni. Utiliser un autopiqueur Peaux épaisses si nécessaire	Former une grosse goutte de sang suspendue, le bras du participant en position décline pour faciliter le prélèvement	Recueillir la goutte de sang suspendue en approchant la pipette horizontalement de la goutte. Ne pas appuyer sur la poire de la pipette	Répéter les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette	
TROD VHB et VHC						
	Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt du TROD VHB	Délivrer deux gouttes de diluant VHB dans la zone de dépôt	Répéter les opérations Prélèvement 3 et 4 pour le deuxième TROD sur le même point de ponction	Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt du TROD VHC	Délivrer deux gouttes de diluant VHC dans la zone de dépôt	
TROD VIH						
	Répéter les opérations Prélèvement 3, 4 et 5 pour le TROD VIH	Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1	Refermer le flacon et l'homogénéiser par 2 inversions	Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane	Répéter l'opération avec les flacons 2 et 3	
LECTURE TROD						
	TROD VIH : lecture immédiate		TROD VHB et TROD VHC : lecture entre 15 et 20 minutes			Évacuer tous les déchets dans une poubelle DASRI (déchets d'activité de soin à risque infectieux) et se laver les mains
	Un point C (contrôle) : Négatif	Deux points C (contrôle) et T (test) : Positif	Aucun point : Invalide	Un trait C (contrôle) : Négatif	Deux traits C (contrôle) et T (test) : Positif	Aucun trait : Invalide